

Balto®BT Soft Elbow Brace

Lietošanai dzīvniekiem.

Lietošanas laikā nav ieteicams dzīvnieku atstāt vienu.

Elkoņa locītavu ortoze suņiem, komplektā divi mīksti spilventiņi.

Lieto elkoņa locītavas sāpju, klibuma, diskomforta problēmu gadījumā, kas var būt saistīts ar priekšējo ekstremitāšu nodilumu.

Lielisks risinājums dzīvniekiem, kuri cieš no ierobežotām kustībām pēc elkoņa locītavu traumām. Ortozes nodrošina stabilitāti un atbalstu suņa priekškājām, neierobežojot dabiskās kustības. Lieliska iespēja dzīvniekiem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts, vienlaikus saglabājot aktīvu dzīvesveidu.

Ortozes pielietošanas gadījumi:

- Elkoņa displāzija
- Hidroma
- Elkoņa iekaisums
- Elkoņa luksācija/nestabilitāte
- Artrīts/artroze
- Var izmantot veselām locītavām, muskuļiem un saitēm, lai novērstu traumas un nodrošinātu strukturālu atbalstu.
- Brūču ārstēšanā - pārsēju aizsardzībai pret košanu, laižīšanu un berzi

Ortozes īpašības:

Kompresija palīdz palielināt asinsspiedienu locītavā un sekojoši arī temperatūru, kas palīdz mazināt sāpes.

Regulējamas augšējās un apakšējās polsterējuma siksnas var pagarināt vai saīsināt uz kājas, lai nodrošinātu lielisku pielāgotību.

Izmēri no S līdz XL. Lai atrastu savam dzīvniekam piemērotāko izmēru, skatīt izmēru tabulu zemāk.

Visas Balto® ortozes ir izgatavotas no augstas kvalitātes elpojoša materiāla, un nesatur neoprēnu, kas ir zināms kā baktērijas uzņemošs, nodrošina nepietiekamu atbalstu un ātri nolietojas. Dažādi izmēri nodrošina drošu piemērotību. Nav nospiedošu siksnu.

Mazgājams ar rokām. Ortozi ir apstiprinājuši un atzinuši veterinārārsti.

Ieteicams visa vecuma dzīvniekiem, ja vien veterinārārsti nav ieteicis citādi. Ja nepieciešams, dzīvniekiem, kas jaunāki par 2 gadiem, lietot ar noteiktu laika intervālu, lai novērstu iespējamās augšanas traucējumus.


Pieejamie izmēri:

IZMĒRS	DZĪVNIEKA SVARS	Izmērs
S	4-10 kg	34 cm – 44,45 cm
M	12-18 kg	40,65 cm - 70 cm
L	20-45 kg	54,5 cm - 90 cm
XL	Virš 45 kg	80 cm - 114 cm

Lietošanas instrukcija:


1. solis

Sagatavo ortozi, atverot siksnas (1. att.).

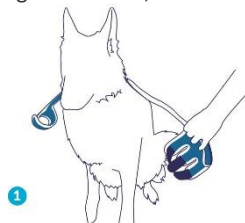

2. solis

Novietojiet ortozi uz kājas, izlīdzinot šinu novietojumu pret pēdas pamatni (2. att.), un aplieciet visas Velcro siksnas (sākot ar apakšējo siksnu) ap kāju.

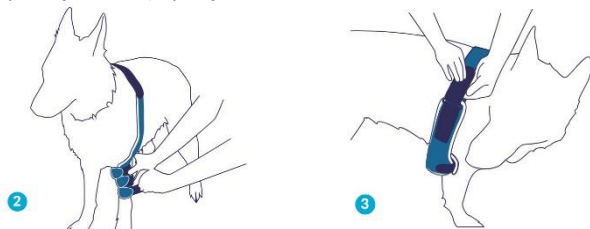


3. solis

Cieši nostipriniet siksnas.

4. solis

Atbalsta siksnu un aproci nostiprina uz pretējās kājas

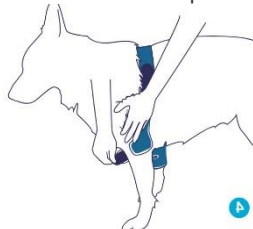

5. solis

Nofiksē ar regulējošu pašlīpošu siksnu



Video pamācība:

YouTube kanālā Balto Tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=fp7PPjtYFeM>

Ieteikumi:

Ļaujiet līdz divām nedēļām dzīvniekam pierast pie ortozes.

Nēsāt 30 minūtes dienā, palielinot par 30 minūtēm katru dienu, līdz sasniedz 12 stundas dienā.

Konsultējieties ar veterinārārstu, lai saņemtu konkrētus norādījumus par to, kad valkāt ortozi.

Noņemiet ortozi, kad dzīvnieks naktī gul.

Pārbaudiet, vai dzīvniekam nav ādas kairinājuma pazīmju. Ja tādas ir, sazinieties ar savu veterinārārstu.

Uzturiet ortozi tīru, to noslaukot, un uzturiet tīru ādu un apmatojumu, kas nonāk saskarē ar ortozi.

Regulāri pārbaudiet vai ortoze nav bojāta.

Uzmanību! Ortozi nedrīkst iznomāt, un atkārtoti lietot citam dzīvniekam, jo sakarā ar individuālo pielāgošanos, un dabisko nolietojuma procesu, citam dzīvniekam tā zaudēs savas īpašības.

Kopšana

Tīra ortoze ne tikai novērš infekcijas, kairinājumu un nepatīkamu aromātu; tas arī ļauj ortozei kalpot ilgāk. Lai palīdzētu uzturēt piederuma ilgmūžību, šeit ir daži no padomiem, kā pareizi veikt ortozes tīrīšanu:

Bieži noņemiet pēc iespējas vairāk pielīpušo matu no jebkura Velcro®, lai novērstu to sablīvēšanos.

Izmantojiet plūksnu noņēmēju vai viegli pielīpošu līmlenti, lai noņemtu matus no ortozes materiāla.

Mazgājiet ar rokām, izmantojiet siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli, lai noņemtu traipus un smakas.

Rūpīgi izskalojiet mazgāšanas līdzekļa paliekas no ortozes materiāla.

Pakariniet, un ļaujiet nožūt. Kad ortoze ir pilnīgi sausa, tā ir gatava lietošanai!

Ražots Itālijā, roku darbs.

Izplatītājs: Bertas Nams SIA, Rīga, Ventspils iela 50, LV-1002, tālr. 80000060