

Balto® BT Jump (Knee Brace)

Lietošanai dzīvniekiem.

Ortoze celim suņiem un kaķiem. Rūpīgi izstrādāta, lai stabilizētu suņa posttraumatisko vai iegūto ceļa locītavas funkcionalitātes samazinājumu. Paredzēta atbalstam vienas no visbiežāk sastopamās traumas - kraniālās krusteniskās saites (Cranial Cruciate Ligament, CCL) traumas gadījumā. Katru gadu skarot miljoniem pacientu, CCL traumas ietver: pilnīgu vai daļēju saites plīsumu, ceļa kaula izmežģījumu un ceļa locītavas slimības, piemēram, artrītu, artrozi un varus / valgus stāvokli. Šī ceļa locītavas ortoze ir lielisks risinājums dzīvniekiem, kuri cieš no ierobežotas mobilitātes pēc CCL traumām. Elpojošs kompresijas apvalks, kas izgatavots no neoprēnu nesaturoša materiāla, nodrošina stabilitāti un atbalstu suņa pakāļkājām, neietekmējot dabiskās kustības. Šī ortoze ir lieliska iespēja dzīvniekiem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts, vienlaikus saglabājot aktīvu dzīvesveidu.

Ortozes pielietojuma gadījumi:

CCL plīsums (daļējs un pilns).

Daļēju CCL plīsumu gadījumā var būt nepieciešami apmēram 6 mēneši, lai stabilizētu stāvokli, un līdz pat gadam, lai izveidotu nobriedušus rētaudus, kas stabilizētu ceļa locītavu pilnvērtīgai funkcionalitātei.

Pilna CCL plīsumā gadījumā, atkarībā no smaguma pakāpes, stāvokļa stabilizēšana var ilgt līdz pat gadam, un vēl vienu gadu, lai izveidotu nobriedušus rētaudus, kas stabilizētu ceļa locītavu pilnvērtīgai funkcionalitātei.

Pēcoperācijas atbalsts (pēc tādām operācijām kā tibial plateau leveling osteotomy (TPLO), tibial tuberosity advancement (TTA), extracapsular lateral suture stabilization (ELSS) un medial patella luxation surgery (MPL).

Strukturāls atbalsts ievainotām vai skartām ekstremitātēm.

Hronisku ceļa locītavas sāpju kontrole.

Fizikālajās terapijas palīgspēja – var izmantot kombinācijā ar hidroterapiju un akupunktūru.

Īpaši apstākļi vai ir vēlams konservatīva ārstēšana; ortozi var izmantot kā alternatīvu operatīvai ārstēšanai, ja pacients tai nav piemērots.

Var izmantot veselām locītavām, muskuļiem un saitēm, lai novērstu traumas un nodrošinātu strukturālu atbalstu.

Ortozes īpašības:

Divas kabatas, kurās ir leņķveida aviācijas alumīnija šinas (vidējās un sānu), kas vajadzības gadījumā palīdz ierobežot ceļa locītavas sānu kustību (t.s. atvilktnes kustību).

Vēdera josta, lai nodrošinātu, ka ortoze ir nostiprināta ap suņa pakāļējo daļu.

Otrā, papildu stabilizācijas siksnā, ir paredzēta aktīvākiem dzīvniekiem.

Ortozi var izmantot arī bez šinām, tādos gadījumos kā artrīts un artroze. Kompresija palīdz palielināt asinsspiedienu locītavas apvidū un sekojoši arī temperatūru, kas palīdz mazināt sāpes.

Regulējamas augšējās un apakšējās polsterējuma siksnas var pagarināt vai saīsināt uz kājas, lai nodrošinātu optimālu pielāgojumu.

Ortozes izmantošana gan kreisajai, gan labajai ceļa locītavai var palīdzēt arī gadījumos, kas saistīti ar:

Vecāka gadagājuma dzīvniekiem vispārēja deģeneratīva procesa rezultātā.

Dzīvniekiem ar lieko svaru, kas izdara papildus spiedienu uz veselo kāju.

Aktīviem dzīvniekiem ar ievērojamu kompensācijas uzvedību.

Izmēri no XXS līdz XL, labās un kreisās puses. Lai atrastu piemērotāko izmēru, skatīt tabulu zemāk.

Visas Balto® ortozes ir izgatavotas no augstas kvalitātes materiāliem, un nesatur neoprēnu, kas ir zināms kā baktērijas uzņemošs, nodrošina nepietiekamu atbalstu un ātri nolietojas. Dažādi izmēri nodrošina drošu piemērotību. Nav nospiedošu siksnu. Mazgājams ar rokām. Ortozi ir apstiprinājuši un atzinuši veterinārārsti.

Ieteicams visa vecuma dzīvniekiem, ja vien veterinārārsti nav ieteicis citādi. Ja nepieciešams, dzīvniekiem, kas jaunāki par 2 gadiem, lietot ar noteiktu laika intervālu, lai novērstu iespējamās augšanas traucējumus.

IZMĀRS	KODS (kreisā/labā puse)	DZĪVNIKA SVARS	A	B	C
XXS	BTJUMPXXSL (kreisā) BTJUMPXXSR (labā)	2-5kg	8-13 cm	3-5 cm	8 cm
XS	BTJUMPXSL (kreisā) BTJUMPXSR (labā)	5-10kg	16-18 cm	5-7 cm	10 cm
S	BTJUMPSL(kreisā) BTJUMPSR (labā)	10 -15kg	21-25 cm	8-15 cm	15 cm
M	BTJUMPML(kreisā) BTJUMPMR (labā)	15 -30kg	26-31 cm	10-16 cm	18 cm
L	BTJUMPLL (kreisā) BTJUMPLR (labā)	28 -50kg	29-34 cm	12-18 cm	22 cm

XL	BTJUMPXLL BTJUMPXLR (labā) (kreisā)	Virš 50kg	virš 36 cm	--	25 cm
----	--	-----------	------------	----	-------

A= augšstilba apkārtmērs vidū starp ceļa kaula izcilni un augšstilba augšdaļu
 B= pakaklājas apkārtmērs vidū starp tarsālo locītavu un ceļa kaula izcilni
 C= attālums starp A un B apkārtmēra līnijām

Lietošanas instrukcija

INSTRUKCIJA ORTOZEI AR ENKURA KOMPLEKTU (VĪR. K. DŽĪVNIKAM)

1. solis


Sagatavo ortozi, atverot siksnas (1. att.).



1

2. solis


Novietojiet ortozi ar centrālo atvērumu pretī ceļa kaulam, un aplieciet visas Velcro siksnas (sākot ar apakšējo siksnu) ap kāju, izverot tās caur sprādzēm. Cieši nostipriniet siksnas pie Velcro lentām.

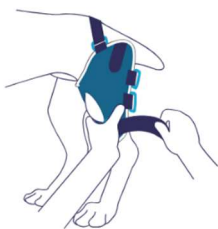

2

3. solis


Novietojiet aizmugurējo (augšējo) siksnu pāri suņa mugurai, atveriet enkura komplektu un aplieciet to ap pretējās pakaklājas augšdaļu. Cieši nostiprināt siksnu pie Velcro lentas.

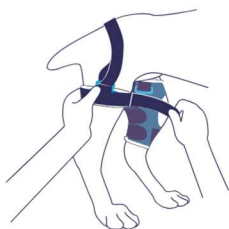

3

4. solis


Siksnas un enkura komplekts ir pielāgojami: Noņemiet siksnu Velcro galus un nogrieziet siksnu vēlamajā garumā. Uzlieciet atpakaļ siksnu Velcro galus un cieši nostipriniet siksnu pie Velcro lentas, lai nodrošinātu, ka stiprinājums ir stabils.

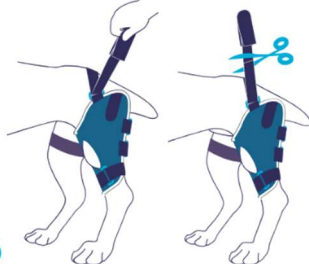

4

5. solis

Izvelciet ortozes otras siksnas vienu galu zem kakla siksnas vai krūšu siksnas (5.A un 5.B attēls) un izvelciet otru siksnu galu zem ortozes aizmugurējās (augšējās) siksnas un nostipriniet siksnas galus uz Velcro lentām (5.C attēls).

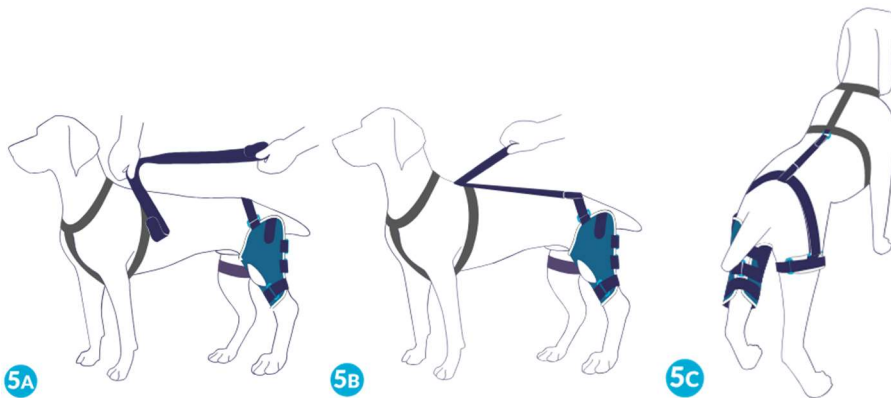


5A **5B** **5C**
PIEZĪME: Ortozes apmaiņa un atgriešana NETIKS pieņemta, ja ortoze pirms tam tiks pielāgota (tiks saīsinātas siksnas).

INSTRUKCIJA BEZ ENKURA KOMPLEKTA (SIEV. K. DŽĪVNIEKIEM)

1. solis

Sagatavojiet ortozi, atverot siksnas, un noņemiet enkura komplektu (A1. att.). Pārlicinieties, ka aizmugurējā siksnā ir piestiprināta pie augšstilba iekšējās (apakšējās) sprādzes (A2. att.).

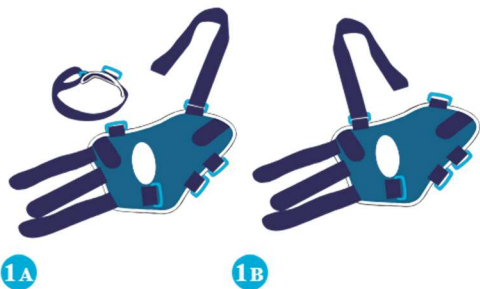


1A

1B

2. solis


Novietojiet ortozi ar centrālo atvērumu pretī suņa ceļa kaulam, un aplieciet visas Velcro siksnas (sākot ar apakšējo siksnu) ap kāju, izverot tās caur sprādzēm. Cieši nostipriniet siksnas pie Velcro lentām..

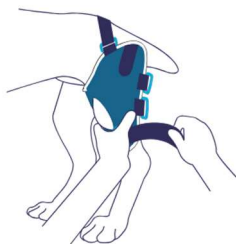

2

3. solis


Aplieciet aizmugurējo (augšējo) siksnu ZEM vēdera un virs muguras. Ievietiet to ortozes augšējā sprādzē un cieši nostipriniet uz Velcro lentas.

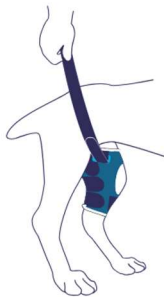

3

4. solis


Siksnas un enkura komplekts ir pielāgojami: Noņemiet siksnu Velcro galus un nogrieziet siksnu vēlamajā garumā. Uzlieciet atpakaļ siksnu Velcro galus un cieši nostipriniet siksnu pie Velcro lentas, lai nodrošinātu, ka stiprinājums ir stabils.

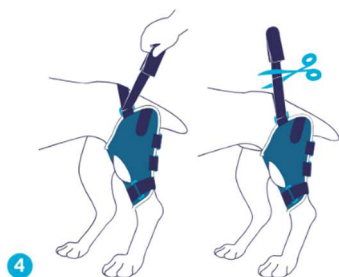

4

5. solis

Izvelciet ortozes otras siksnas vienu galu zem kakla siksnas vai krūšu siksnas (5.A un 5.B attēls) un izvelciet otru siksnu galu zem ortozes aizmugurējās (augšējās) siksnas un nostipriniet siksnas galus uz Velcro lentām (5.C attēls).

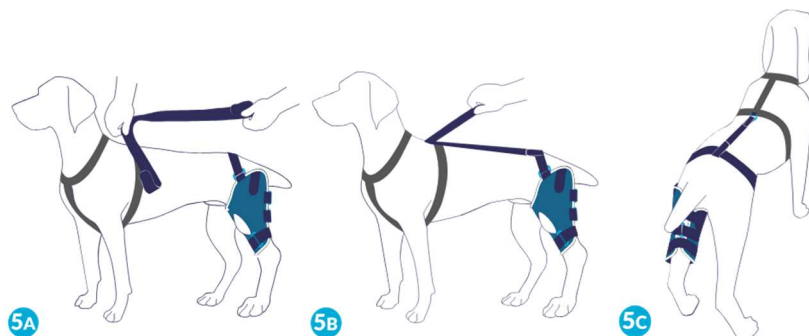

5A

5B

5C

PIEZĪME: Ortozes apmaiņa un atgriešana NETIKS pieņemta, ja ortoze pirms tam tiks pielāgota (tiks saīsinātas siksnas).

Videopamācība: YouTube kanālā Balto Tutorial:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLL1dHI_9H2nRRV-yb_AHvs2ckmL5EE0xD

Ieteikumi

Ļaujiet līdž divām nedēļām dzīvniekam pierast pie ortozes.

Nēsāt 30 minūtes dienā, palielinot par 30 minūtēm katru dienu, līdz sasniedz 12 stundas dienā.

Konsultējieties ar veterinārārstu, lai saņemtu konkrētus norādījumus par to, kad valkāt ortozi.

Noņemiet ortozi, kad dzīvnieks naktī guļ.

Pārbaudiet, vai dzīvniekam nav ādas kairinājuma pazīmju. Ja tādas ir, sazinieties ar savu veterinārārstu.

Uzturiet ortozi tīru, to noslaukot, un uzturiet tīru ādu un apmatojumu, kas nonāk saskarē ar ortozi.

Regulāri pārbaudiet, ka ortoze nav bojāta.

Uzmanību! Ortozi nedrīkst iznomāt, un atkārtoti lietot citam dzīvniekam, jo sakarā ar individuālo pielāgošanos, un dabisko nolietojuma procesu, citam dzīvniekam tā zaudēs savas īpašības.

Ortozes kopšana

Tīra ortoze ne tikai novērš infekcijas, kairinājumu un nepatīkamu aromātu; tas arī ļauj ortozei kalpot ilgāk. Lai palīdzētu uzturēt piederuma ilgmūžību, šeit ir daži no padomiem, kā pareizi veikt ortozes tīrīšanu:

Bieži noņemiet pēc iespējas vairāk pielīpušo matu no jebkura Velcro®, lai novērstu to sablīvēšanos.

Izmantojiet plūksnu noņēmēju vai viegli pielīpošu līmlenti, lai noņemtu matus no ortozes materiāla.

Mazgājiet ar rokām, izmantojiet siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli, lai noņemtu traipus un smakas.

Rūpīgi izskalojiet mazgāšanas līdzekļa paliekas no ortozes materiāla.

Pakariniet, un ļaujiet nožūt. Kad ortoze ir pilnīgi sausa, tā ir gatava lietošanai!

Ražots Itālijā, roku darbs. Izplatītājs: Bertas Nams SIA, Rīga, Ventspils iela 50, LV-1002, tālr. 80000060.