

Balto® BT Up (Rear Body Harness)

Lietošanai dzīvniekiem.

Ortoze suņiem. Ķermeņa aizmugurējās daļas atbalstam, nodrošinot mobilitāti, papildus ir iespējams atbalsts no suņu saimniekiem, fiziski paceļot ar ortozes rokturiem. Lielisks risinājums suņiem, kuri cieš no ierobežotām pārvietošanās spējām un kustību grūtībām pēc traumām, slimībām vai sakarā ar novecošanos. Elpojošā ortozes atbalsta daļa, kas izgatavota no neoprēnu nesaturoša materiāla, nodrošina stabilitāti un atbalstu suņa aizmugurējai daļai, neietekmējot dabiskās kustības. Ortoze arī netraucē dzīvniekam nokārtot dabiskās vajadzības. Lieliska iespēja suņiem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts, vienlaikus saglabājot aktīvu dzīvesveidu.

Ortozes pielietojuma gadījumi:

Alternatīva dvieļa vai cita sadzīves priekšmeta lietošanai suņa ķermeņa atbalstam, kas var izraisīt vēdera traumas, vai ir neērts atbalsta sniedzējam.

Pēcooperācijas mobilitātes atbalsts.

Fizikālās terapijas palīgiespēja– var izmantot kombinācijā ar hidroterapiju un akupunktūru.

Klīnikā vai terapijā, lai atbalstītu pacientus ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Kāpšanai iekšā vai ārā no transportlīdzekļiem un lai pārvietotos pa kāpnēm.

Ortozes īpašības :

Divas īsas aviācijas alumīnija šinas; novietotas sānos gareniski , lai nodrošinātu strukturālu atbalstu / stingrumu, vienlaikus saglabājot mobilitāti.

Ortozi var izmantot arī bez šinas, artrīta un artrozes, gūžas locītavas displāzijas, pakaļkāju daļējas vai pilnas paralīzes gadījumā.

Regulējamas siksnas var pagarināt vai saīsināt, lai nodrošinātu lielisku pielāgotību.

Rokturi ar regulējamu augstumu ļauj ērti noregulēt attālumu no ortozes līdz atbalsta sniedzēja rokām.

Izmēri no XS līdz XL. Lai atrastu savam dzīvniekam piemērotāko izmēru, skatīt izmēru tabulu zemāk.

Visas Balto® ortozes ir izgatavotas no augstas kvalitātes materiāliem, un nesatur neoprēnu, kas ir zināms kā baktērijas uzņemošs, nodrošina nepietiekamu atbalstu un ātri nolietojas. Dažādi izmēri nodrošina drošu piemērotību. Nav nospiedošu siksnu. Mazgājams ar rokām. Ortozi ir apstiprinājuši un atzinuši veterinārārsti.

Ieteicams visa vecuma suņiem, ja vien veterinārārstš nav ieteicis citādi. Ja nepieciešams, dzīvniekiem, kas jaunāki par 2 gadiem, lietot ar noteiktu laika intervālu, lai novērstu iespējamus augšanas traucējumus.

IZMĒRS	KODS	APKĀRTMĒRS
XS	BTUPXS	15-20 cm
S	BTUPS	25-30 cm
M	BTUPM	30-35 cm
L	BTUPL	40-45 cm
XL	BTUPXL	50-55 cm

Apkārtmērs =augšstilba augšdaļas apkārtmērs

Lietošanas instrukcija


1. solis

Sagatavojiet ortozi, atverot siksnas un noņemot regulējamo rokturi (1. att.).




2. solis

Izklājiet ortozes pamatdaļu uz grīdas, un ievietojiet suņa kājas pamatdaļas atverēs. Pavelciet ortozi uz augšu, aplokiet ap suni un nostipriniet visas siksnas, izmantojot klipšu sprādzes (2. - 6. att.).

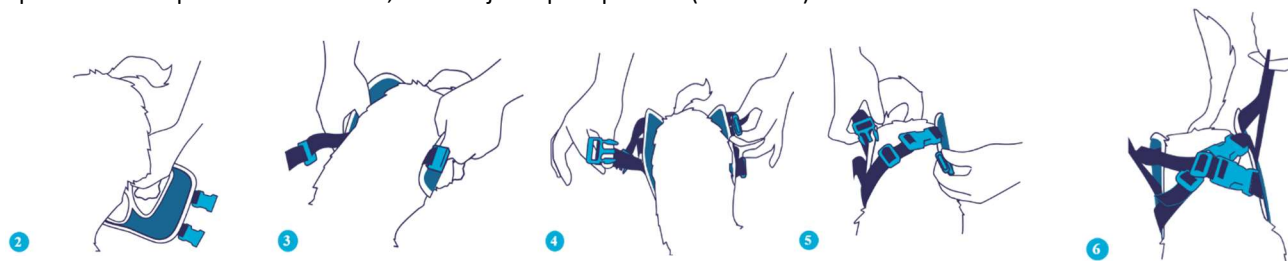


3. solis

Pēc vajadzības noregulējiet siksnu garumu (7. att.).

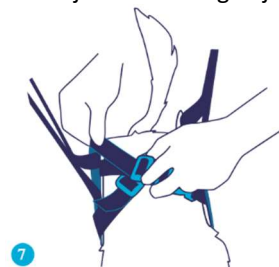

4. solis

Piestipriniet regulējamo rokturi un pēc vajadzības noregulējiet (8. un 9. att.).

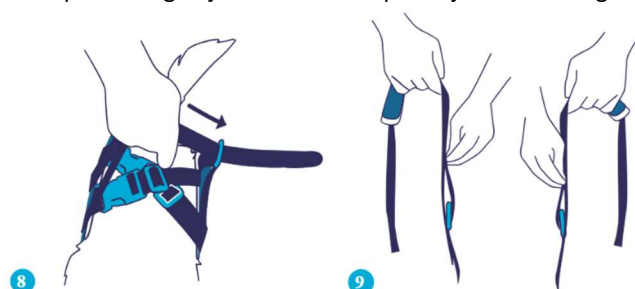

Videopamācība: YouTube kanālā Balto Tutorial:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLL1dHI_9H2nRRV-yb_AHvs2ckmL5EE0xD

Ieteikumi

Ļaujiet līdz divām nedēļām dzīvniekam pierast pie ortozes.

Nēsāt 30 minūtes dienā, palielinot par 30 minūtēm katru dienu, līdz sasniez 12 stundas dienā.

Konsultējieties ar veterinārārstu, lai saņemtu konkrētus norādījumus par to, kad valkāt ortozi.

Noņemiet ortozi, kad dzīvnieks naktī guļ.

Pārbaudiet, vai dzīvniekam nav ādas kairinājuma pazīmju. Ja tādas ir, sazinieties ar savu veterinārārstu.

Uzturiet ortozi tīru, to noslaukot, un uzturiet tīru ādu un apmatojumu, kas nonāk saskarē ar ortozi.

Regulāri pārbaudiet, ka ortoze nav bojāta.

Uzmanību! Ortozi nedrīkst iznomāt, un atkārtoti lietot citam dzīvniekam, jo sakarā ar individuālo pielāgošanos, un dabisko nolietojuma procesu, citam dzīvniekam tā zaudēs savas īpašības.

Ortozes kopšana

Tīra ortoze ne tikai novērš infekcijas, kairinājumu un nepatīkamu aromātu; tas arī ļauj ortozei kalpot ilgāk. Lai

palīdzētu uzturēt piederuma ilgmūžību, šeit ir daži no padomiem, kā pareizi veikt ortozes tīrīšanu:

Bieži noņemiet pēc iespējas vairāk pielīpušo matu no jebkura Velcro®, lai novērstu to sablīvēšanos.

Izmantojiet plūksnu noņēmēju vai viegli pielīpušu līmlenti, lai noņemtu matus no ortozes materiāla.

Mazgājiet ar rokām, izmantojiet siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli, lai noņemtu traipus un smakas.

Rūpīgi izskalojiet mazgāšanas līdzekļa paliekas no ortozes materiāla.

Pakariniet, un ļaujiet nožūt. Kad ortoze ir pilnīgi sausa, tā ir gatava lietošanai!

Ražots Itālijā, roku darbs. Izplatītājs: Bertas Nams SIA, Rīga, Ventspils iela 50, LV-1002, tālr. 80000060.