

KVP ausu aizsegs suņiem Green Pinpoint Mesh

Lietošanai dzīvniekiem.

Pielieto atveseļošanās laikā pēc ausu hematomas, ausu ievainojumiem, niezes un kasīšanās gadījumā. Palīdz aizsargāt ausu kanālus no svešķermeņu iekļūšanas u. c. apkārtējās vides iedarbības. Nodrošina gan pēcoperācijas, gan ausu ikdienas aizsardzību, t.sk. pēc zāļu lietošanas ausu kanālā. Mazgājams gan mašīnā, gan ar rokām. Lycra® kakla josla papildu komfortam.

Divas drošas siksnas un regulējamas plastmasas šinas nodrošina pielāgojumu galvas formai un piegulšanu. Izgatavots no elpojoša mesh tīkla auduma.



| KODS | IZMĒRS | A | B |
|---------|--------|---------------|---------------|
| NFP01XS | XS | 13 cm - 18 cm | 23 cm - 33 cm |
| NFP02S | S | 15 cm - 20 cm | 30 cm - 43 cm |
| NFP03SM | SM | 18 cm - 23 cm | 38 cm - 51 cm |
| NFP04M | M | 20 cm - 25 cm | 41 cm - 56 cm |
| NFP05L | L | 25 cm - 30 cm | 43 cm - 58 cm |
| NFP06XL | XL | 30 cm - 36 cm | 51 cm - 66 cm |

A = attālumš no pieres vidus virs acīm līdz līnijai uz kakla, kur atrodas kakla siksnā.

B = kakla apkārtmērs.

Lietošana.

1. Uzlikt aizsega kakla joslu ap kaklu (skatīt attēlus uz iepakojuma), lai zem tās varētu brīvi ievietot 1-2 pirkstus.
2. Augšējo aizsega daļu aplikt ap galvu. Ja aizsegs aizsedz acis, izvilkt šinas, saīsināt tās līdz vēlamajam garumam, un noapaļot griezumā stūrus. Attiecīgi pielāgot aizsega novietojumu uz galvas.
3. Nostiprināt visus Velcro stiprinājumus, t.s. savilkt pakauša siksnu (cinch strap). Velcro stiprinājumus var saīsināt līdz piemērotam garumam, ja nepieciešams.
4. Uzmanīgi! Pirms mazgāšanas izņemt plastmasas šinas. Mazgāt 30 C temperatūrā. Nežāvēt veļas žāvēšanas mašīnā.

Izcelsme: KVP EU, ES.

Izplata: Bertas Nams SIA, Rīga, Ventspils iela 50, LV-1002, tālr. 80000060