

MIKROČIPS Felixcan animal ID

Dzīvnieku (mazo mīldzīvnieku) identifikācijai. Mikročips 1.4 X 8,5 mm, sterils, ar injektoru, atbilst ISO 11784/11785, FDX-B standartiem. Komplektā iekļautas uzlīmes ar mikročipa identifikācijas numuru un tam atbilstošo svītrkodu.

Lietošana:

1. Implantu ievada pilnvarots speciālists.
2. Skenē, vai identificējamam dzīvniekam jau iepriekš nav ievadīts implants.
3. Skenē implantu neatvērtā iepakojumā un pārbauda, vai implanta kods atbilst svītru koda uzlīmes kodam, kura pievienota katram implantam.
4. Pārbauda, vai sterilais iepakojums nav atvērts vai bojāts.
5. Sagatavo injekcijas vietu atbilstoši aseptikas procedūram.
6. Noņem drošinātāju no šļirces virzuļa.
7. Noņem adatas aizsargapvalku.
8. Ar rādītājpirkstu un īkšķi saņem ādas kroku virs injekcijas vietas un injicē adatu subkutānajos audos zem ādas krokas, pleca apvidū muguras viduslīnijā punktā pret lāpstiņas apvidus priekšpusi.
9. Ar īkšķi pabīdīt injektora virzuli līdz atdurei, lai injicētu implantu, vienlaicīgi lēni izvelkot adatu.
10. Kad izvelkat adatu, injekcijas vietu saspiež ar īkšķi un rādītājpirkstu, lai noslēgtu brūci un novērstu asiņošanu.
11. Implantam jānovietojas paralēli ādas virsmai.
12. Skenē ievadīto implantu, lai pārliecinātos par tā atbilstošu darbību. Nolasītāju tur tieši pie dzīvnieka ādas virsmas.
13. Koda uzlīmi no iepakojuma ielīmē dzīvnieka vakcinācijas grāmatīnā.
14. Nodrošina, lai identificētā dzīvnieka dati tiek ievadīts valsts mājdzīvnieku reģistrā.

Glabāšana un derīguma termiņš: Glabāt sausā vietā, istabas temperatūrā. Derīguma (sterilitātes) termiņš norādīts uz uzlīmes iepakojumā. Nelietot, ja iepakojums ir bojāts. Izcelsme: Felixcan, Spānija. Izplatītājs: SIA „Bertas Nams”, Ventspils iela 50, Rīga, tel. 80000060